


## 01 / 部件名称

注意：开箱后请检查清洗盒及配件是否齐全，是否有损伤、变形、开裂！

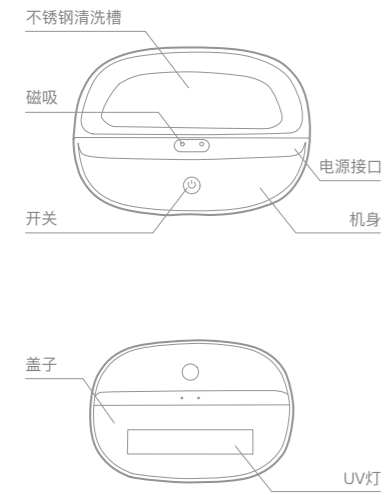

## 02 / 注意事项

1、儿童注意事项  
将清洗盒及配件放置在儿童无法触及的地方；  
禁止儿童在没有监护人监督的情况下使用或清洗维修保养此机器；  
禁止儿童玩耍包装盒及包装袋避免窒息的危险。


2、电击危险  
如机器、电源线或插头有明显可见损坏迹象，请停止使用该清洗盒；  
请将电源线连接在合规的插座上，并提供相匹配的电源，确保连接后插座可以正常使用；  
清洗机器前，不使用机器时或雷暴天气时，请从插座上取下电源。  
切勿对清洗盒电源线或配件进行任何改装，并私自使用非原厂外的配件；  
非专业人员，请勿拆卸清洗盒。

3、由潮湿引起的电击危险  
禁止用水冲洗整机，以防触电；  
请勿在浴缸、淋浴室、盥洗盆或其它含水容器附近使用这种清洗盒；  
请勿将清洗盒放在会掉入水中的地方；  
保护清洗盒免受潮湿、滴水或溅水；  
不要用湿手触摸清洗盒；  
如果清洗盒掉入水中，请立即拔出电源插头，从水中拿出放于干燥处。

## 03 / 使用要点

禁止在清洗槽内加入研磨、含腐蚀的化学溶剂，避免腐蚀清洗槽；  
禁止使用酒精、汽油或易燃液体，否则可能导致火灾或爆炸，造成的损坏不属于保修范围；  
清洗槽内无水时，请勿开启清洗盒。无水运行会损坏清洗盒；  
加水时，请务必确保水位能浸泡要清洗物品，并且不要超过“MAX”标记；  
清洗物品时，请轻拿轻放；  
切勿将清洗盒放在靠近热源或火源的地方。

## 04 / 工作原理

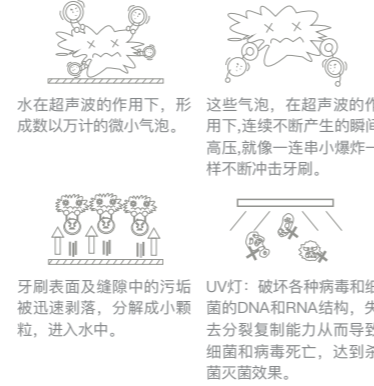

## 1

## 隐形眼镜的清洗

1. 隐形眼镜放置盒加入专用清洗液后，将隐形眼镜/美瞳放入盒子后盖上盖子；
2. 倒入槽内一半水量后，放入装有隐形眼镜/美瞳的眼镜盒，开启清洗机清洗；
3. 清洗完毕后倒出隐形眼镜盒内的清洗液，加入干净专用清洗液即可。

## 06 / 保养与维护

- 应定期对设备进行全面检查。
1. 检查电源及输出线各接点有无松动、过热、受潮和接触不良现象。
  2. 检查清洗槽底板密封情况，有无泄漏。清洗槽的接缝处是否渗漏。
  3. 超声设备存放场所的通风、干燥、洁净等有利于设备的长期高效使用。
  4. 清洗结束后，请拔掉电源，并倒掉清洗槽的水；请不要将水长时间放在清洗槽中。
  5. 用干毛巾将清洗槽和机身表面水珠擦干；禁止用水直接冲洗，以防触电！用完产品后将其存放于阴凉干燥处。

## 07 / 产品参数

mini魔焕清洗盒  
产品型号：GT-M1  
超声功率：8W  
超声频率：45kHz  
内槽尺寸：115.2x42.3x22.3mm(LxWxH)  
产品尺寸：122.7x86.7x48.3mm(LxWxH)  
容量：92ml  
最高水位线：60ml  
时间设定：5分钟自动定时  
内槽材质：304不锈钢  
额定电压：DC 12V, 1A  
电源适配器电压：AC 220V-240V, 50Hz  
标准配置：mini魔焕清洗盒\*1, 电源适配器\*1

产品中有害物质的名称及含量						
根据中国《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》						
有害物质						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	X	0	0	0	0	0
压电陶瓷晶片	0	0	0	0	0	0
SUS#304缸体	0	0	0	0	0	0
塑胶外壳	0	0	0	0	0	0
适配器	X	0	0	0	0	0
包装印刷组件	0	0	0	0	0	0

## 5


## 08 / 售后服务

尊敬的用户：

1. 产品自购买之日起（以发票为准），保修1年（不含易耗品）；
2. 在保修期内，产品凡属于性能故障，我司将提供免费维修服务；
3. 下列情况不属于免费保修范围，但可以实行收费修理：  
(1)产品超出保修期；  
(2)无法提供产品保修卡及购机发票的；  
(3)人为因素或用户使用不当造成的损坏，如进水、碎裂、损毁或有腐蚀等现象；  
(4)正常使用产生的产品磨损与老化；  
(5)未经我公司许可，自行或非我公司授权服务人员维修、更换非本公司产品零件或拆卸造成的故障或损坏。

本公司对条例中内容有最终解释权。

## 05 / 操作方法

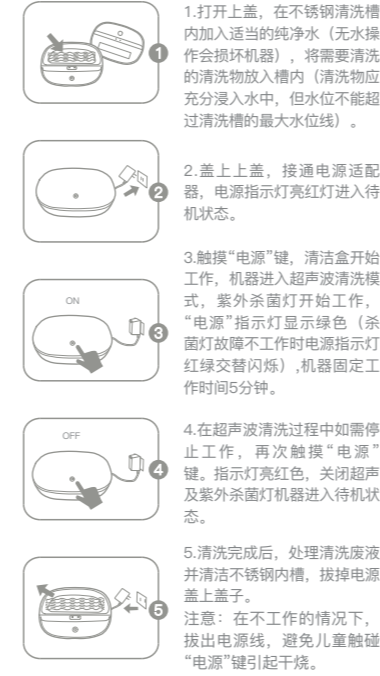

## 2

## 保修凭证

产品型号	
产品颜色	
购买日期	
订单编号	
联系地址	
联系电话	

客户姓名	
联络电话	
联系地址	

请用户妥善保管保修卡，遗失不补，涂改无效。

广东固特超声股份有限公司  
全国免费服务热线：400-699-1799  
地址：广东省梅州市园特科技园  
电话：0753-8123 288 传真：0753-8123 298  
网址：www.gtsonic.cn 邮箱：vip@gtsonic.cn

## 6

广东固特超声股份有限公司  
GUANGDONG GT ULTRASONIC CO.,LTD

产品名称：mini魔焕清洗盒  
产品型号：GT-M1  
服务热线：400-699-1799  
网址：www.gtsonic.com  
制造商：广东固特超声股份有限公司  
地址：广东省梅州市园特科技园

服务号

成品尺寸：55x105mm 材质：铜版纸  
装订方式：10P\*手风琴式\*四折页

## 封底

GT SONIC

GT-M1  
mini魔焕清洗盒使用说明书  
使用产品前请仔细阅读本说明书

## 7

mini魔焕清洗盒说明书  
GT-M1

成品尺寸：55x105mm 材质：铜版纸  
装订方式：10P\*手风琴式\*四折页

封面  
封底

内页印刷色：CMYK

封面封底----印金色底 Pantone 8382 C  
叠印Pantone 2216 U

PANTONE 2216 U  
PANTONE 8382 C

## 8

## 封面